


FitMax™ Masque Facial Total CPAP - Mise en place

Guide de taille



1. Choisir la taille adéquate à l'aide du guide de tailles fourni dans le carton.

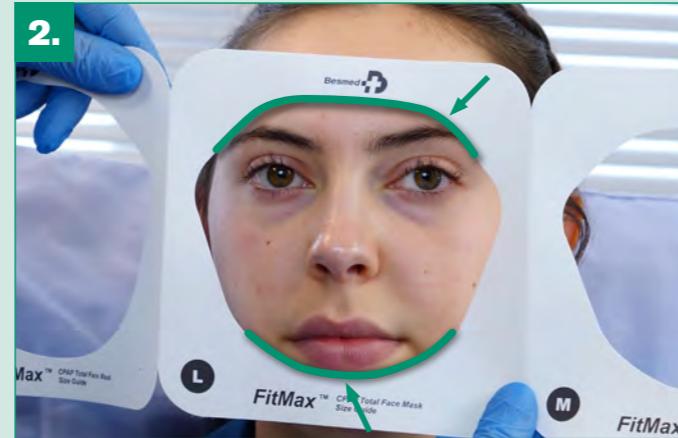

2. Le haut de la jupe du masque doit faire contact juste au-dessus des sourcils et le bas de la jupe juste en-dessous de la lèvre inférieure.

Mise en place du masque



3. Connecter le coude au raccord à rotule et vérifier qu'il tourne sans encombre.



4. Si utilisation du coude orange - Vérifier les orifices de fuite situés sur le coude et s'assurer que la valve de sécurité est présente et intacte.



5. Lever le serre-tête au-dessus de la tête du patient et positionner le masque en le tenant par la partie bombée, non par le coude.



6. Attacher le serre-tête à ses points de fixation.



7. Ajuster le serre-tête à l'aide des lanières latérales, inférieures et supérieures. **Le masque ne doit pas être trop serré sur le visage.**



8. **Ajuster la lanière supérieure pour éloigner les lanières latérales des oreilles du patient.**



9. Ouvrir le débit de gaz et connecter le circuit respiratoire d'un geste de pousser/tourner. **Effectuer les derniers ajustements pendant que le patient est allongé.**



10. **S'assurer que le serre-tête n'est pas trop serré.** Les lanières doivent être ajustées pour minimiser la pression de contact tout en assurant une bonne étanchéité.



FitMax™ Masque Facial Total CPAP

Le masque facial total CPAP FitMax est une interface de VNI à patient unique pour un usage en CPAP et VDNF dans un environnement hospitalier. Il est disponible en trois tailles adultes (>30kg) et en deux versions de raccord coudé (**A fuite** avec valve de sécurité et **Standard** sans fuite).



Référence	Description	Code couleur	Qté/bte
A utiliser avec des tuyaux simples			
2290020	FitMax masque facial total CPAP, avec coude à fuite et valve de sécurité, serre-tête, moyen	Orange	10
2290030	FitMax masque facial total CPAP, avec coude à fuite et valve de sécurité, serre-tête, grand	Orange	10
2290040	FitMax masque facial total CPAP, avec coude à fuite et valve de sécurité, serre-tête, extra grand	Orange	5

Référence	Description	Code couleur	Qté/bte
A utiliser avec des circuits double branche			
2290070	FitMax masque facial total CPAP, avec coude standard, serre-tête, moyen	Bleu	10
2290080	FitMax masque facial total CPAP, avec coude standard, serre-tête, grand	Bleu	10
2290090	FitMax masque facial total CPAP, avec coude standard, serre-tête, extra grand	Bleu	5

📺 Vidéo Mise en place du FitMax disponible sur www.intersurgical.fr

Pour voir notre gamme complète d'interfaces patient, visitez : www.intersurgical.fr/info/interfaces-patient

Les masques FitMax sont fabriqués par Besmed Health Business Corporation, Taiwan et distribués par Intersurgical Ltd